

# Förflyttningsbälte 2Walk



Art.nr	Produkt	Höjd Ryggplatta	Höjd Sidor	Midjemått
□ 9008	Förflyttningsbälte 2Walk	34 cm	13 cm	60 - 140 cm

## Förflyttningsbälte 2Walk

En helt ny design av gång- och förflyttningsbälte från Protecta Medical med lösningar som gör förflyttningssituationer lättare för såväl vårdtagare som personal!

Det unika med detta bälte är att det är tvådelat och består av en hög halvstyv halvvcirkelformad ryggdel som är enkel att sätta på plats, samt en magplatta med flera handtag på varje del.



## Användning

När ryggdelen är på plats knäpps magplattan fast och på detta sätt har man alltid handtag placerade såväl framför som bakom vårdtagaren. Storleken justeras med dragremmar, från 60 cm till 140 cm.

Ryggdelens halvstyva material gör det mycket enkelt att placera den på plats då vårdtagaren ligger i sängen, sitter i stol eller rullstol. Den höga ryggdelen upplever vårdtagaren ofta som ett skönt stöd. Insidan på ryggdelen är antiglidbehandlad för att bältet inte skall glida upp.

Magplattan är försedd med ett kraftigt anti-glidband. En av bältets stora fördelar är den universella storleken - ett bälte som passar nästan alla vårdtagare!

## Säkerhet

Funktionstesta 2Walk regelbundet genom att dragtesta handtagen. Kontrollera att sömmar, material och spänne ser hela ut.

## Uppresning från stol:

Utnyttja ryggplattans översta handtag med armen som läggs över skuldran och greppa magplattans handtag med andra handen. Detta ger en naturlig framåtlutning av patienten och uppresning görs enkelt för både patient och hjälpare. Mångfalden av handtag gör det enkelt att ta bra grepp som ger närhet och därmed en trygg känsla av säkerhet för patienten.

## Material:

Bälte: Oxfordnylon och kantband i nylon  
Remmar: Polyester  
Spänne: Thermospänne

## Brukarvikt:

Max 150 kg

## Tvättråd:

Tvättas i 60°C.  
Droptorkning rekommenderas.  
Kan avtorkas med ytsprit.  
Ej Sköljmedel eller Klorin.

